

코지 황사방역마스크 KF94
에티라인 디자인등록
제30-2016-0043735호

COZY
Protection Face Mask

윤문

COZY
Protection Face Mask

제30-2016-0043735호

에티라인 디자인등록
KF94 코지마스크
일단 한번 써
보시라니깐요

대형 30PCS

MADE IN KOREA

코지 황사방역마스크 KF94

식약처제조허가 1053 호
식약처품목허가 제26호



- 본 제품은 식약처 황사 및 미세먼지 KF94 기준에 준하여 차단합니다.
- 김서림 방지 및 미세먼지 유입을 방지하는 알루미늄 코벤드가 내장되어 있습니다.
- 밀착형 앞면 에티라인으로 외부 공기 유입을 차단합니다.
- 고정클립으로 안전하게 밀착이 가능하고 착용감이 부드럽습니다.

COZY
Protection Face Mask

제30-2016-0043735호

에티라인 디자인등록
KF94 코지마스크
일단 한번 써
보시라니깐요

대형 30PCS

MADE IN KOREA

마스크 착용 방법

① 코벤드가 있는 부분을 위로하여 ② 연결고리를 이용하여 머리 뒤로 ③ 코를 중심으로 코벤드 양쪽을 눌러 머리끈을 귀에 걸쳐 위치를 고정 머리끈을 연결합니다. 안면 전체가 밀착되도록 하여 틈이 없는지 확인 후 사용합니다.

효능 효과

- 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 호흡기를 보호합니다.

주의 사항

- 산소 농도 18% 미만의 밀폐된 장소에서 사용하지 마십시오.
- 수건, 휴지 등을 사용하여 호흡기를 감싼 다음 그 위에 착용하지 마십시오.
- 마스크 인콕이 오염되었을 때에는 사용하지 마십시오.
- 세탁하여 사용하지 마십시오. (미세먼지 필터 손상)
- 면제를 피그리드나거나 변형하여 사용하지 마십시오.
- 착용 후 마스크의 표면을 만지지 마십시오.
- 임신부, 호흡기/심혈관 질환자, 어린이, 노인자 등 마스크 착용으로 호흡이 불편한 경우 사용을 중지하고, 필요시 의사 등의 전문가와 상의 바랍니다.
- 본 제품은 원료 고유의 냄새가 날 수 있습니다.
- 습기나 발레로 인해 오염, 변질될 수 있으므로 실온에서 밀폐하여 건조한 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 품 명 : 코지블랙황사방역마스크 (대형) KF94
- 성 분 명 : 겔라틴(폴리프로필렌 부직포), 안감(부직포), 필터(부직포), 머리끈(폴리우레탄, 나일론),코펜(알루미늄), 연결고리(폴리옥시메틸렌)
- 수 량 : 30매
- 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
- 제조번호 : 별도표기
- 사용기한 : 용기 하단 표기일까지
- 제 조 원 : (주)에이스바이오메드 / 경기도 부천시 석천로 398번길 22 032-329-8583
- * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 따라 교환 및 환불 받을 수 있습니다.

